



Guide de démarrage

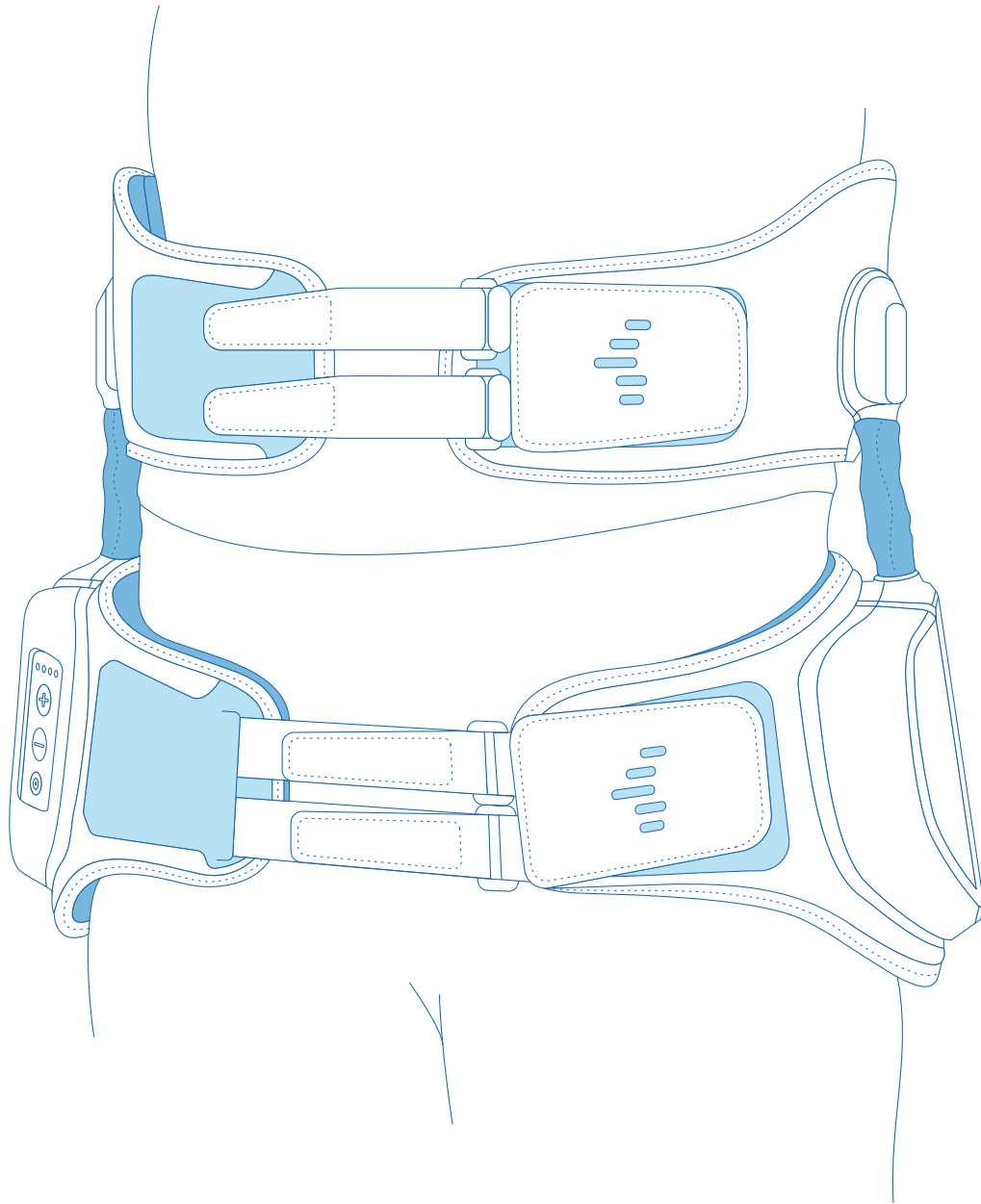


Ajustement initial de TEOS^{MC}

Procédure d'ajustement des ceintures supérieure et inférieure. Informations supplémentaires disponibles dans les pages 10 et 12 du manuel d'utilisateur.

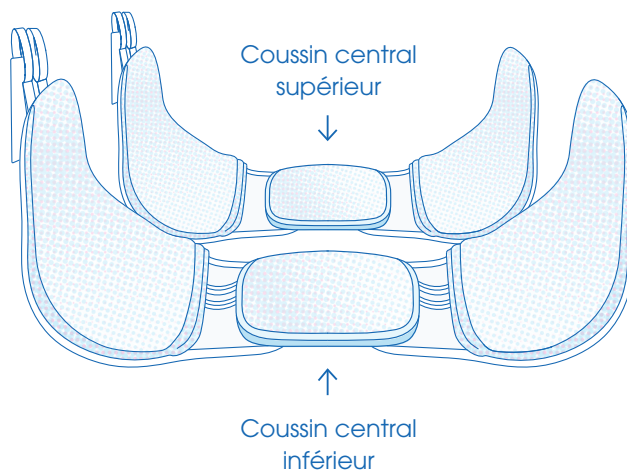


1/4

Retirez les coussins centraux des ceintures inférieure et supérieure.

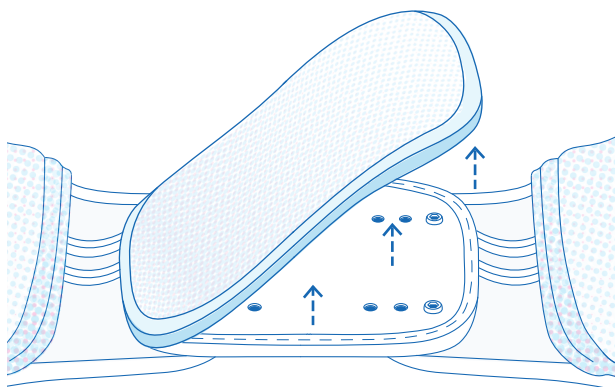


2/4

Utilisez la clé Allen pour dévisser les 4 vis de réglage situées à l'intérieur des coussins centraux.

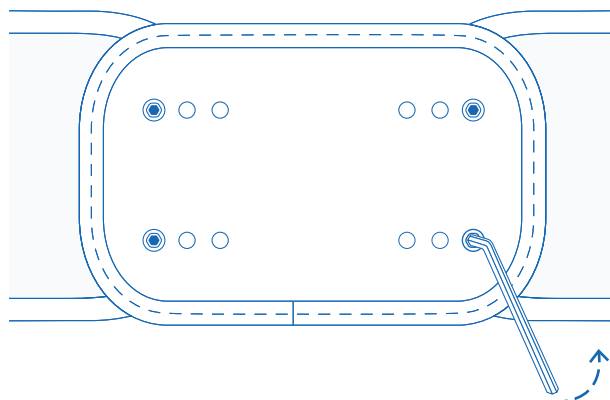


3/4

Glissez les panneaux pour ajuster l'alignement et la position selon vos préférences. Référez-vous à la charte d'ajustement se trouvant aux pages 11 et 12 du manuel.

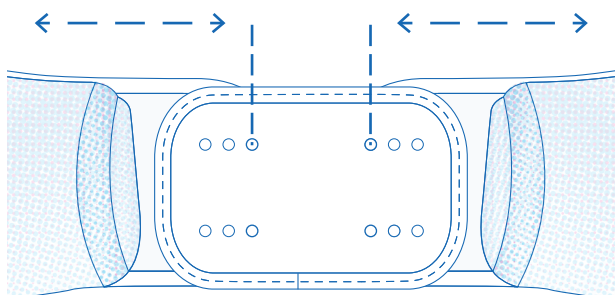


4/4

Revissez les 4 vis avec la clé Allen, puis remplacez les coussins centraux.

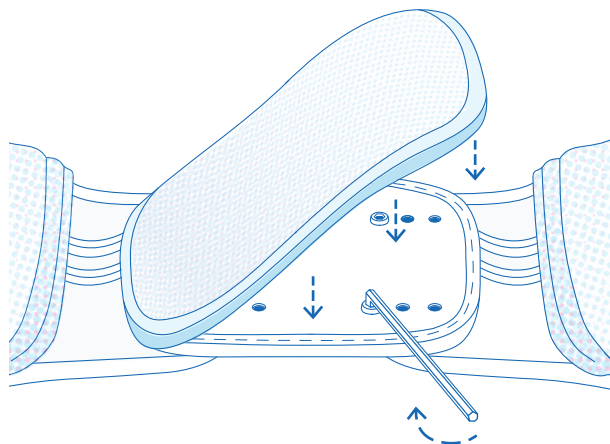


Mise en place de TEOS^{MC}

Placez la ceinture lombaire autour de vos hanches en vous assurant que la ceinture thoracique soit abaissée. Si ce n'est pas le cas, abaissez-la à l'aide du bouton de réinitialisation (0).

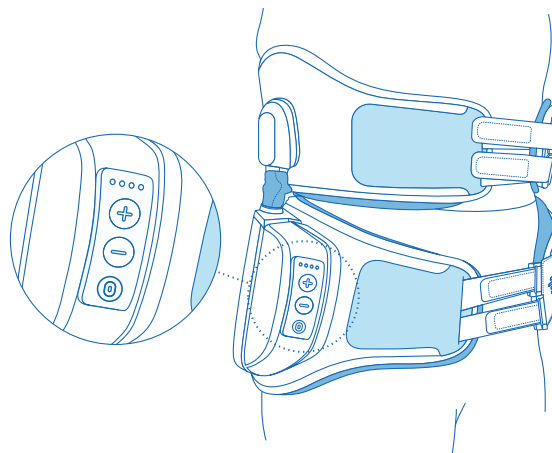


1/4

Attachez la ceinture lombaire autour de vos hanches à l'aide de la sangle principale.

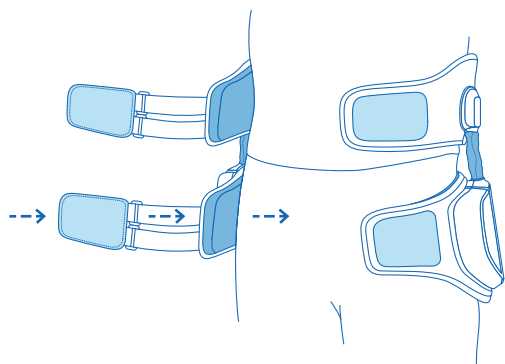


2/4

Attachez la ceinture thoracique autour de votre abdomen à l'aide de la sangle principale.

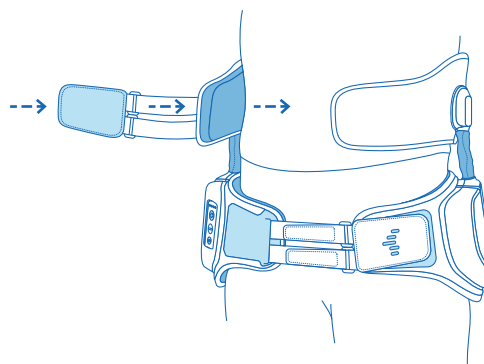


3/4

Ajustez la ceinture lombaire autour de vos hanches en serrant les sangles de fixation doubles pour fixer la ceinture.

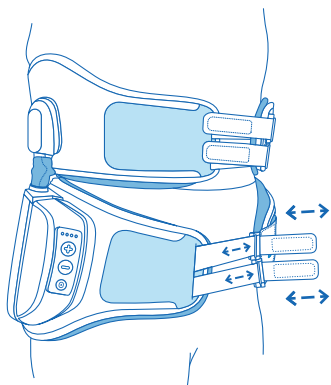


4/4

Serrez également les sangles de fixation doubles pour ajuster la ceinture thoracique autour de votre torse.

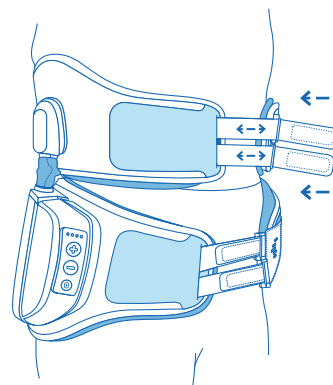


Ajustement de la force de décompression lombaire de TEOS^{MC}

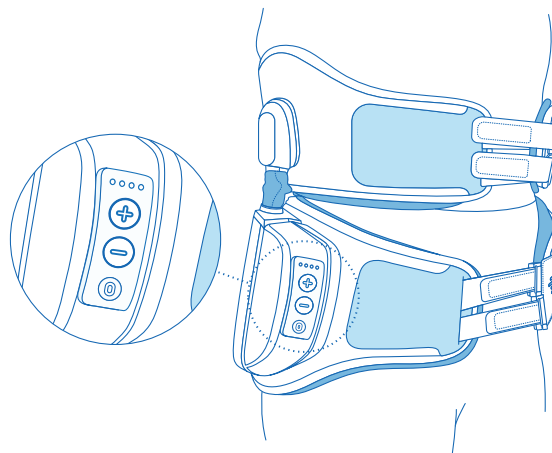


1/2

Pour générer une force de décompression, appuyez sur le bouton (+) et maintenez-le enfoncé jusqu'à atteindre le niveau de confort souhaité.

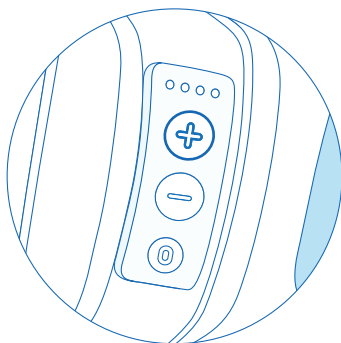

2/2

Pour réduire la force de décompression, appuyez sur le bouton (-).

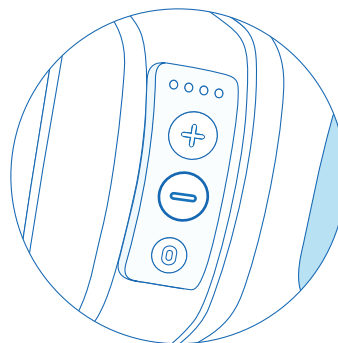

Si vous sentez que la ceinture lombaire se déplace sur vos hanches, cela signifie qu'elle n'est pas assez serrée. Abaissez complètement la ceinture thoracique à l'aide du bouton de réinitialisation et resserrez les ceintures en suivant les étapes de "Mise en place de TEOS^{MC}".



Pour plus d'informations en lien avec le produit, veuillez-vous référer au manuel d'utilisateur.



406-1825 boulevard Henri-Bourassa,
Québec (Québec) G1J 0H4, Canada
info@saintfrancisbrace.com